


Montage Anleitung


Aufstehsessel Alvaro





Danke, dass Sie sich für den Alvaro Aufstehsessel von REHASHOP entschieden haben.

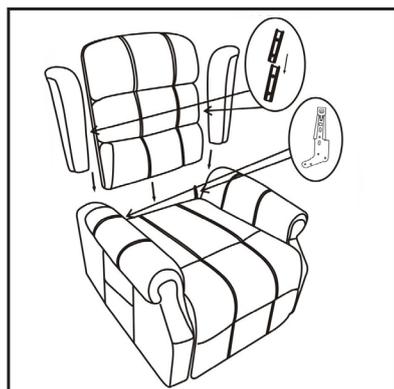

1. Stecken Sie die Rückenlehne in die entsprechende Aufnahmevorrichtung und drücken Sie die Lehne gleichmäßig nach unten, bis diese in der vorgesehene Vorrichtung einrastet.

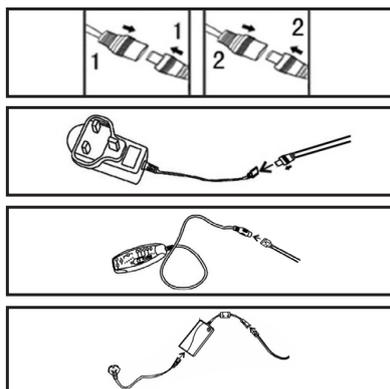

2. Kontrollieren Sie, ob die Stecker vom Motor zur Steckdose und vom Motor zur Fernbedienung eingesteckt sind und festsitzen.

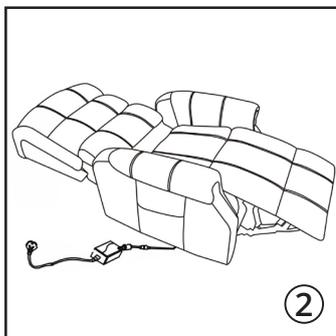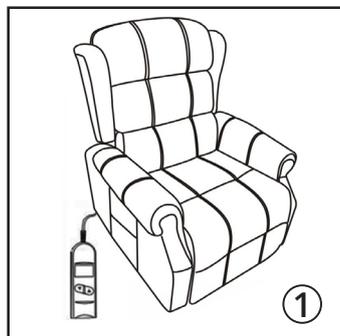

3. Mit der Fernbedienung haben Sie folgende Verstellmöglichkeiten:
Der Sessel kann von Sitzposition (1) in Relaxposition (2) und von der Sitzposition in die Aufstehposition (3) verstellt werden.

- Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl und benutzen Sie den Sessel nicht als Trittleiter.
- Verwenden Sie den Sessel immer nur für eine Person.
- Setzen Sie sich nur auf den Sessel, wenn alle Schrauben und Knöpfe fest angebracht sind.
- Dieser Sessel sollte nicht benutzt werden, wenn Teile fehlen.
- Ein Nichteinhalten der aufgeführten Warnungen kann zu Verletzungen führen.